


AVANOS

CORTRAK* 2

Enteral Access System (EAS)

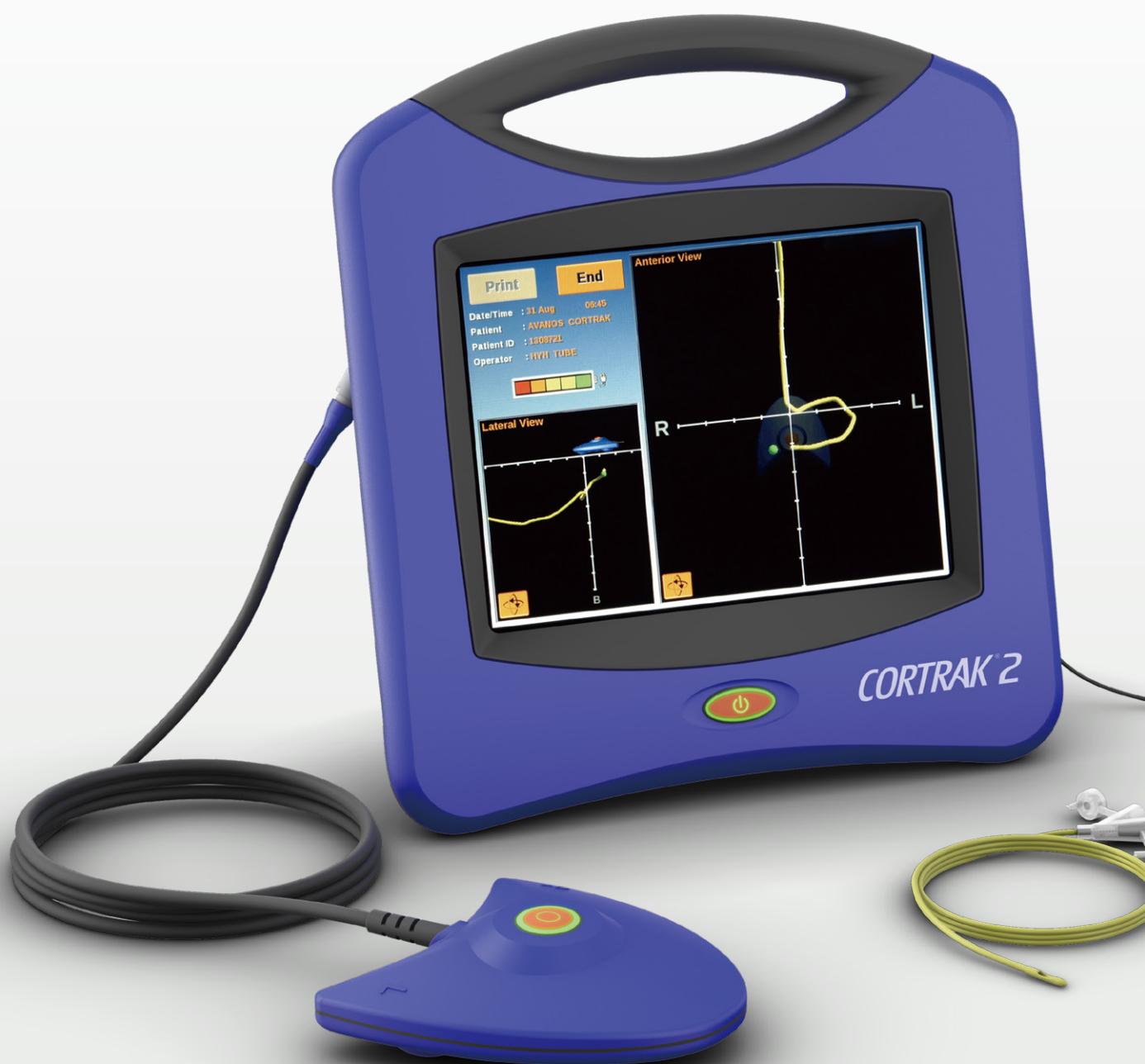

CORTRAK* 2

Enteral Access System (EAS)

米国 FDA に最初に認可された経腸栄養チューブ挿入追跡装置、
コートラックは類似装置の中で最も長い販売実績があります。
経腸栄養チューブ挿入時にカテーテルの先端位置をリアルタイムで
追跡することができる日本国内で唯一の装置*です。
より安全なカテーテル留置と早期の栄養投与開始を補助し、
患者さまの早期回復と医療現場の負担軽減をサポートします。

*2019年5月時点




スマート・レシーバー・ユニット (SRU)

患者の体外部に配置し、「コートラック用経腸
栄養チューブ」先端部のトランスミッター
から信号を受信します。

空腸留置をサポートする2大機能


01 | リアルタイム機能

よりスピーディーなカテーテル留置をサポートするためにコートラックは「リアルタイム」機能を搭載。留置位置を直感的にイメージできるコートラックの Anterior View (アンテリアビュー) では「リアルタイム」機能によって肺などへの誤挿入を素早く予測、迅速な臨床的判断を可能にし、誤挿入リスクを軽減します。

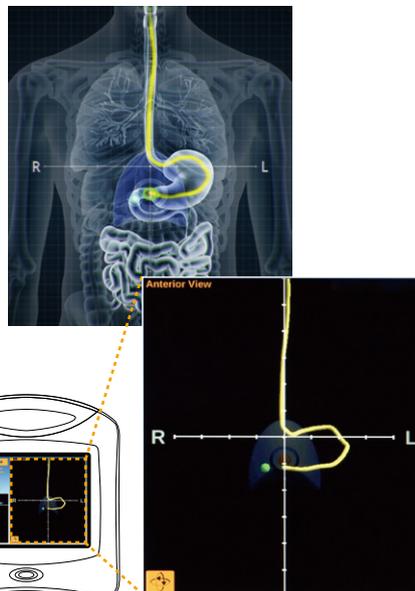

▲アンテリアビュー

肺への誤挿入例

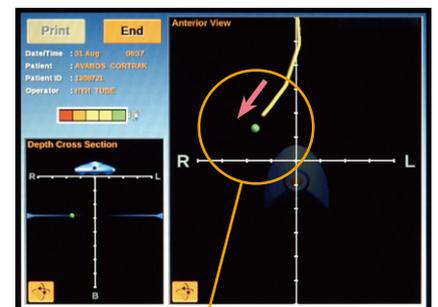

肺への誤挿入時には、先端ポイントが中心のガイドラインから逸れて動いていくので、「リアルタイム」機能により素早い予測・判断のサポートが可能です。



モニター・ユニット

「スマート・レシーバー・ユニット (SRU)」から情報を受け取り、体内のカテーテル位置をリアルタイムに視覚化します。

CONFIRMATION WITHOUT DELAY





コートラック用経腸栄養チューブ

先端内部にトランスミッターを搭載しており、「スマート・レシーバー・ユニット (SRU)」へ信号を送ります。


02 | 三次元トラッキング機能

難易度が高いとされる空腸への留置では「三次元トラッキング」機能によって、より立体的に視覚サポートを行い、正対図だけでは把握が困難だった臓器の形状や配置のイメージを容易にします。幽門部付近では幽門通過の指標となる視覚情報を提供。Lateral View (ラテラルビュー) では胃と十二指腸の形状に沿って先端ポイントが下降し、カテーテルをより早く空腸へと導けるよう視覚的なサポートを行います。

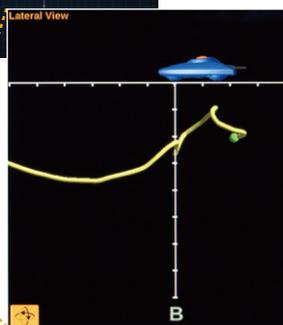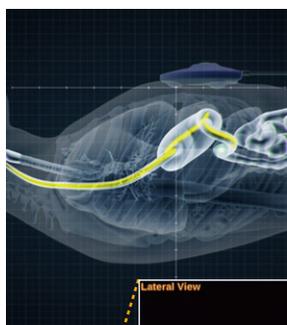


▲ラテラルビュー

幽門通過の指標

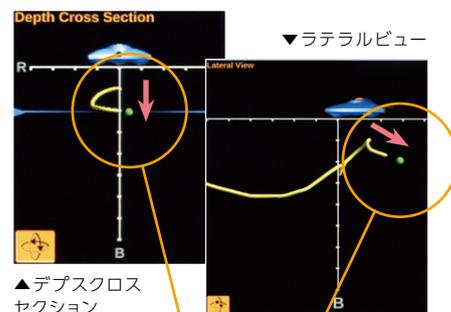

▲デプスクロスセクション

幽門通過時には胃と十二指腸の形状に沿って先端ポイントが下降するので、カテーテルをより早く空腸へと導けるよう視覚的なサポートを行うことが可能です。

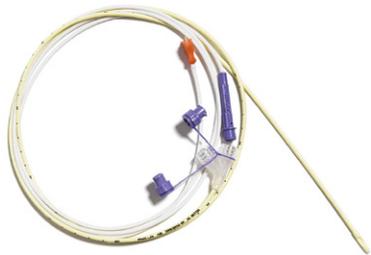

コートラック用経腸栄養チューブ

品番	品名	入数
42-9368TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 8FR, 91cm	10本
42-9438TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 8FR, 109cm	10本
42-9558TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 8FR, 140cm	10本
42-9361TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 10FR, 91cm	10本
42-9431TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 10FR, 109cm	10本
42-9551TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 10FR, 140cm	10本
42-9362TRAK2	コートラック用経腸栄養チューブ (スタイレット付) 12FR, 91cm	10本

*全て接続部はEnFit® Connectorとなります



コートラック本体及び周辺製品

品番	品名		入数
20-0950	コートラック本体	メインユニット	1台
		スマートレシーバーユニット	1台
		中間ケーブル	1本
		ACアダプタ (電源コードセットを含む)	1セット
		内蔵リチウムイオンバッテリー (メインユニット用)	1個
20-0920	スタンド		1台
20-0928	プリンタ		1台
20-0926	プリンタ用内蔵リチウムイオンバッテリー		1個
20-0929	プリンタ用リチウムイオンバッテリー充電器 (ACアダプタ及び電源コードセットを含む)		1台
20-0911	プリンタ用ラベルロール * 1ロール使用目安 125回分		3ロール
20-0951	アクセサリキット	スタビライザー	1個
		角度調整器	1個
		USBメモリ	1個
		スタイラスペン	1本
20-0930	レシーバー防護カバー * 1ロール使用目安 25回分		4ロール

販売名: コートラック

医療機器承認番号: 22800BZX00142000

販売名: コートラック用経腸栄養チューブ

医療機器承認番号: 22800BZX00308000

製造販売元:

アバノス・メディカル・ジャパン・インク

〒220-8115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー

Tel. (045) 682-5150

Fax. (045) 682-5154

製品に関するお問い合わせ: **FreeCall 0800-100-5100**

AVANOS

www.avanos.jp

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©2019 AVNS. All rights reserved.

19DMKT01-B